



1  
Choisissez une zone d'incision sur la surface plane du talon.



2  
Retirez le cran de sécurité, situé sur le côté de la lancette en le pliant doucement d'avant en arrière si nécessaire. Ne pas tirer sur la gâchette jusqu'à ce que le système soit appliqué sur le talon.



3  
Placer l'encoche de la lame contre le talon, la gâchette d'activation étant en direction opposée à l'utilisateur. Tirer la gâchette avec l'index. Retirer le dispositif et jetez le.



4  
Essayez doucement les premières gouttelettes de sang avec un coton sec et stérile. Recueillez la quantité de sang désirée.



### Americas

3883 Rogers Bridge Road NW  
Suite 501  
Duluth, GA 30097  
Tel: +1 770 448 9493

### Asia

15 Hoe Chiang Road #12-02  
Tower Fifteen  
Singapore 089316  
Tel: +65 63451588

### Europe

Tel: +44 330 122 2630

**MediPurpose**<sup>™</sup>

medipurpose.com/babylance