



1
Selecione um local de incisão na superfície inferior plana do calcanhar.



2
Rode e remova o bloqueio do gatilho. Não puxe o gatilho para trás até estar pronto para utilizar.



3
Posicione a ranhura da lâmina contra o calcanhar, afastando o gatilho do utilizador. Pressione o gatilho para trás com o dedo indicador.



4
Limpe a primeira gotícula de sangue. Recolha a quantidade de sangue desejada.



Americas
3883 Rogers Bridge Road NW
Suite 501
Duluth, GA 30097
Tel: +1 770 448 9493

Asia
15 Hoe Chiang Road #12-02
Tower Fifteen
Singapore 089316
Tel: +65 63451588

Europe
Tel: +44 330 122 2630

MediPurposeTM
medipurpose.com/babylance