





**1** Saubere Teststelle mit Isopropylalkohol und der Luft trocknen. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Sicherheit Lancet.

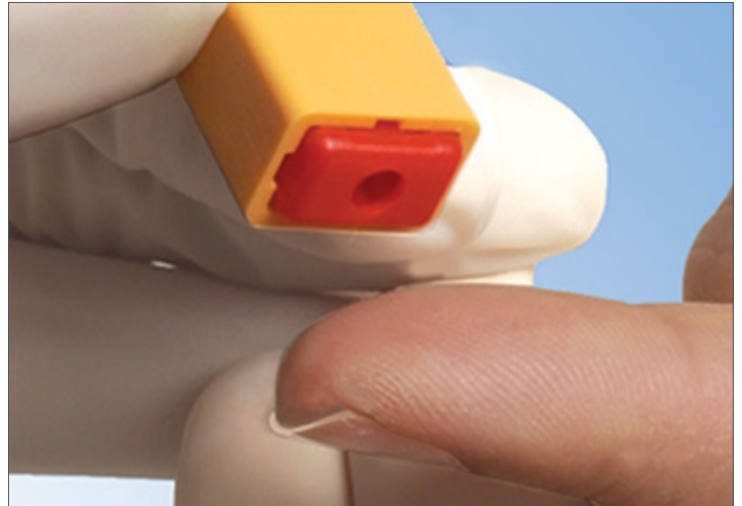

**2** Ort rot Ende der Sicherheit Lancet auf dem Testgelände.



**3** Drücken Sie die Sicherheit Lancet gegen Test Site zu aktivieren des Lancet Mechanismus.

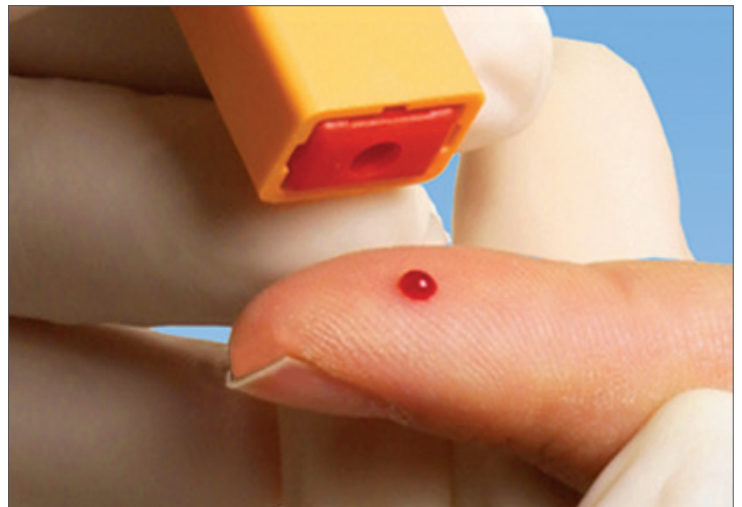

**4** Einmal verwendet, werfen Lancette in Müllbehälter.

Das Gerät ist zur einmaligen Verwendung bestimmt. Die Wiederverwendung dieses Geräts kann zu einer Kreuzkontamination.

[medipurpose.com/surgilance/ifu/](https://www.medipurpose.com/surgilance/ifu/)