





1 Nettoyer le site d'essai avec de l'alcool isopropylique et sécher à l'air. Retirer le capuchon protecteur de la lancette de sécurité.

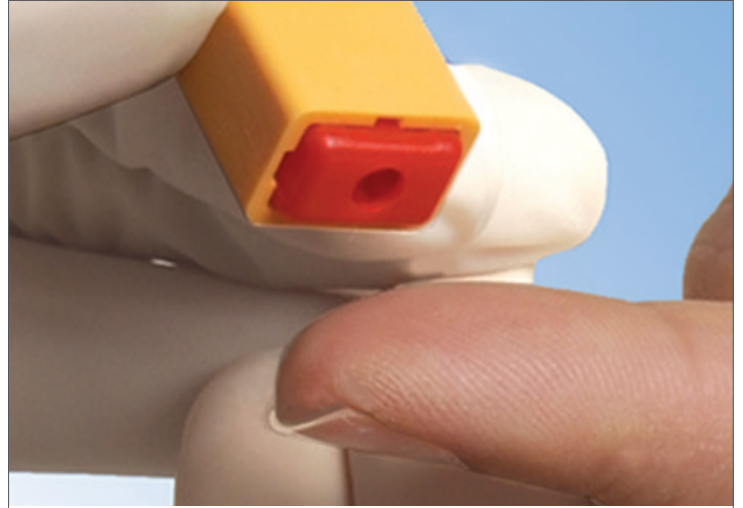

2 Placez la pointe rouge de la sécurité lancet sur le site d'essai.



3 Pousser la sécurité lancet vers le bas contre le site de test pour activer le mécanisme de la lancette.

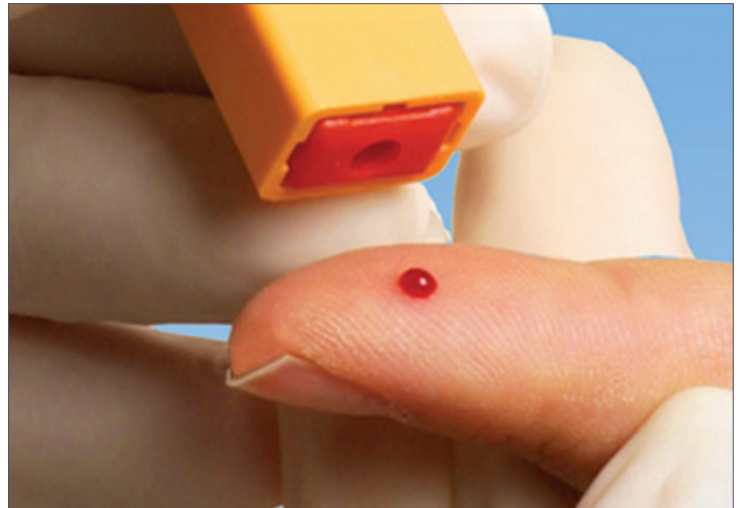

4 Une fois utilisé, jetez la lancette dans un récipient approprié.

1. Assurez-vous que les mains sont bien lavées avant et après l'utilisation de l'appareil.
2. En cas d'utilisation dans des établissements de soins de santé, assurez-vous que les lancettes sont utilisées avec un équipement de protection individuelle approprié, par ex. gants.
3. A n'utiliser que sur un seul patient. Jetez l'ensemble de l'appareil après utilisation.
4. Avertissement : Non destiné à plus d'un usage. Ne pas utiliser sur plus d'un patient. Une mauvaise utilisation des lancettes de sang peut augmenter le risque de transmission accidentelle d'agents pathogènes à diffusion hématogène, en particulier dans les contextes où plusieurs patients sont testés.

5. La lancette de sécurité Surgilance™ est conçue pour les professionnels de la santé à utiliser dans les établissements de soins de santé. Les utilisateurs à domicile qui sont physiquement et mentalement capables d'utiliser l'appareil pour des raisons d'auto-test doivent consulter leur fournisseur de soins de santé avant utilisation.
6. En cas d'incident grave, contactez MediPurpose à sales@medipurpose.com et/ou l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit.