




**1** Limpie el sitio de prueba con alcohol isopropílico y secar al aire. Retire la tapa protectora de la lanceta de seguridad.

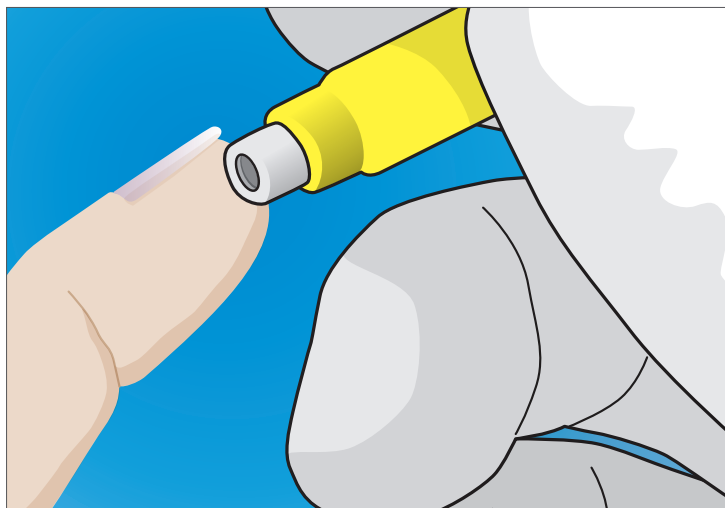

**2** Coloque la punta de la lanceta en el sitio de la prueba.

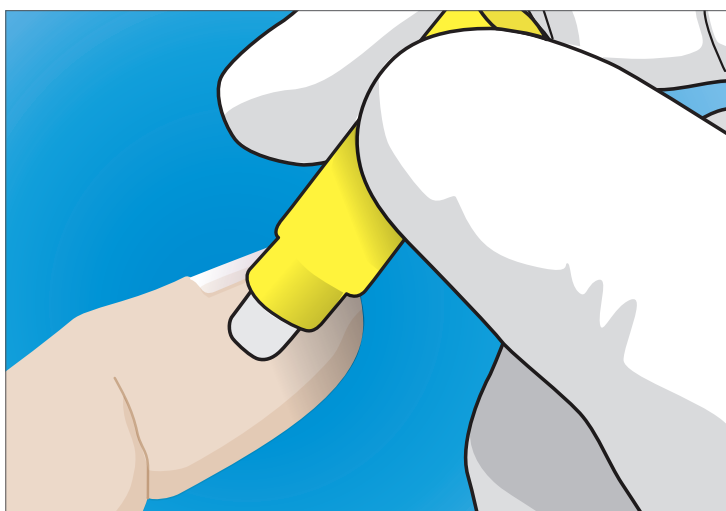

**3** Empuje la lanceta de seguridad contra el sitio de prueba para activar el mecanismo de punción.

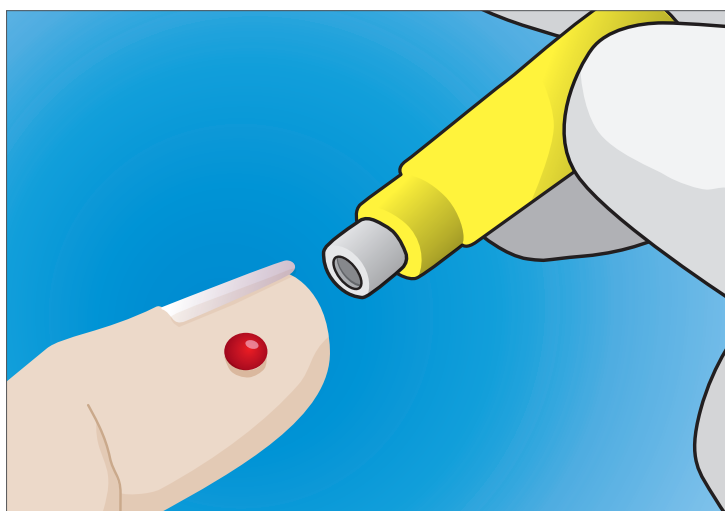

**4** Una vez utilizado, simplemente deseché la lanceta en un contenedor de objetos punzantes.

1. Asegúrese de lavarse las manos correctamente antes y después de usar el dispositivo.
2. Si se usa en entornos de atención médica, asegúrese de que las lancetas se usen con el equipo de protección personal adecuado, p. guantes.
3. Para uso único en un solo paciente. Deseche todo el dispositivo después de su uso.
4. Advertencia: No está diseñado para más de un uso. No lo use en más de un paciente. El uso inadecuado de las lancetas para sangre puede aumentar el riesgo de transmisión inadvertida de patógenos transmitidos por la sangre, particularmente en entornos donde se analizan múltiples pacientes.

5. La lanceta de seguridad Surgilance™ Lite está diseñada para que los profesionales de la salud la utilicen en entornos de atención médica. Los usuarios domésticos que sean física y mentalmente capaces de usar el dispositivo por razones de autoevaluación deben consultar a su proveedor de atención médica antes de usarlo.
6. En caso de incidente grave, póngase en contacto con MediPurpose a [sales@medipurpose.com](mailto:sales@medipurpose.com) y/o con la autoridad competente del Estado Miembro en el que se produjo el incidente.