





**1** Limpe o local do teste com álcool isopropílico e seque ao ar. Retire a tampa protetora da lanceta de segurança

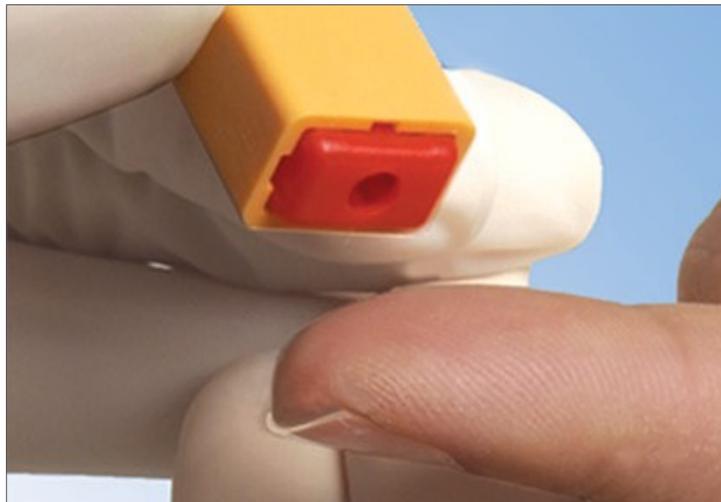

**2** Posicione a extremidade vermelha da lanceta de segurança no local do teste.



**3** Empurre a lanceta de segurança para baixo contra o local de teste para activar o mecanismo da lanceta.

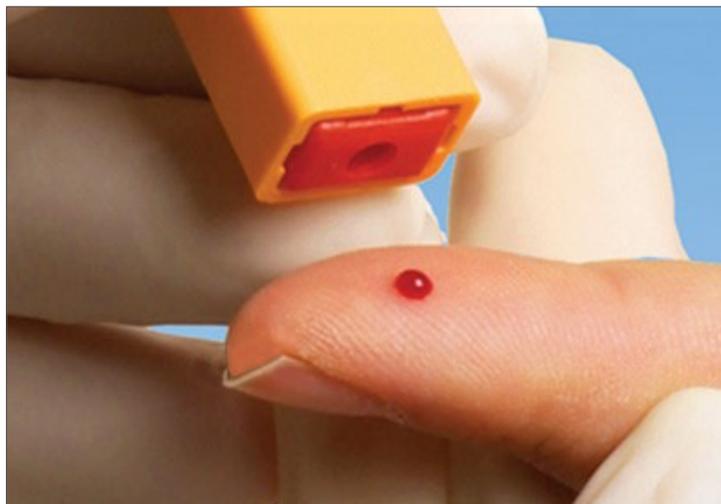

**4** Uma vez utilizada, descarte a lanceta para um recipiente para objectos cortantes

1. Certifique-se de que as mãos são lavadas adequadamente antes e após o uso do dispositivo.
2. Se utilizadas em ambientes de cuidados de saúde, certifique-se de que as lancetas são utilizadas com equipamento de proteção individual adequado, por exemplo, luvas
3. Para utilização apenas num único doente. Descarte o dispositivo completo após a utilização.
4. Aviso: Não se destina a mais do que uma utilização. A utilização incorrecta de lancetas de sangue pode aumentar o risco de transmissão inadvertida de agentes patogénicos pelo sangue, especialmente em ambientes onde são testados vários doentes

- A lanceta de segurança Surgilance™ foi concebida para profissionais de saúde para ser utilizada em ambientes de cuidados de saúde. Os usuários domésticos que sejam física e mentalmente capazes de usar o dispositivo por motivos de autoteste devem consultar seu médico antes de usar.
5. No caso de um incidente grave, entre em contacto com a MediPurpose em [sales@medipurpose.com](mailto:sales@medipurpose.com) com e/ou a autoridade competente do Estado Membro em que o incidente ocorreu.