





1 Nettoyer le site d'essai avec de l'alcool isopropylique et sécher à l'air. Retirer le capuchon protecteur de la lancette de sécurité.

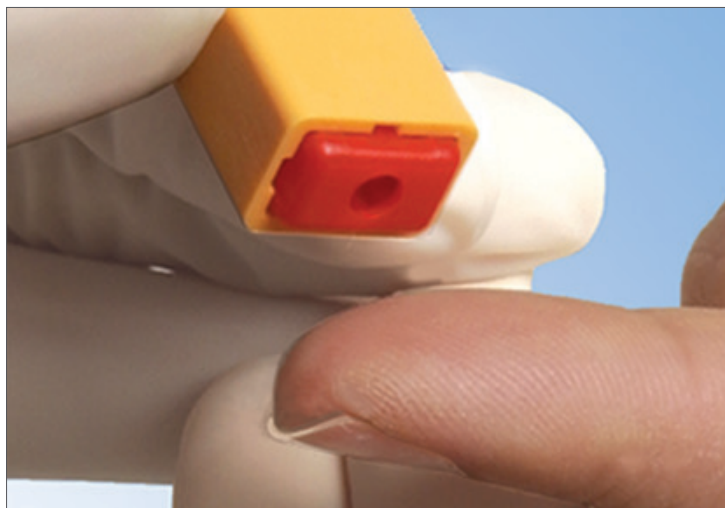

2 Placer la partie rouge de la lancette de sécurité sur le site d'essai.



3 Pousser la lancette de sécurité vers le bas contre le site d'essai pour activer son mécanisme.

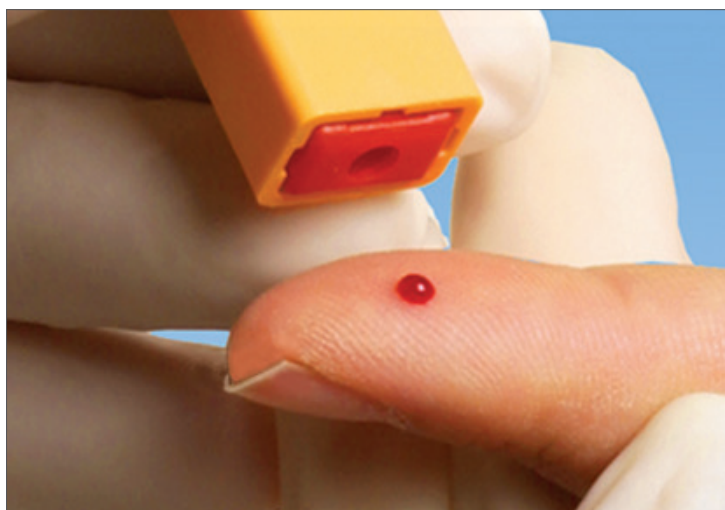

4 Une fois utilisée, jeter la lancette de sécurité dans une poubelle.

1. Veillez à vous laver soigneusement les mains avant et après l'utilisation du dispositif.
2. Pour des raisons de sécurité et afin de maintenir la stérilité, ne poussez pas la plateforme rouge en relief sur le doigt du patient avant d'être prêt à prélever un échantillon de sang.
3. La lancette de sécurité SurgiLance™ est conçue pour les professionnels de santé et destinée à être utilisée dans des environnements de soins. Les utilisateurs à domicile, physiquement et mentalement aptes à utiliser le dispositif pour des raisons d'autotest, doivent consulter leur professionnel de santé avant utilisation.
4. En cas d'utilisation dans un établissement de soins, veillez à utiliser les lancettes avec un équipement de protection individuelle approprié, par exemple des gants.
5. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

6. Ne pas conserver dans un environnement à température ou humidité élevées, ou en présence de gaz corrosifs.
7. Conserver au sec et dans un endroit bien aéré.
8. Ne pas utiliser si le produit est humide ou périmé.
9. Avertissements : Le dispositif n'est pas destiné à être réutilisé. Ne pas utiliser un même dispositif sur plus d'un patient. Une utilisation inappropriée des lancettes de prélèvement sanguin peut augmenter le risque de transmission accidentelle d'agents pathogènes hématogènes, en particulier dans les environnements où plusieurs patients sont testés.
10. En cas d'incident grave, contacter MediPurpose à l'adresse sales@medipurpose.com et/ou l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit.

[medipurpose.com/surgilance/ifu/](https://www.medipurpose.com/surgilance/ifu/)

MediPurpose™