





1 Saubere Teststelle mit Isopropylalkohol und der Luft trocknen. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Sicherheit Lancet.

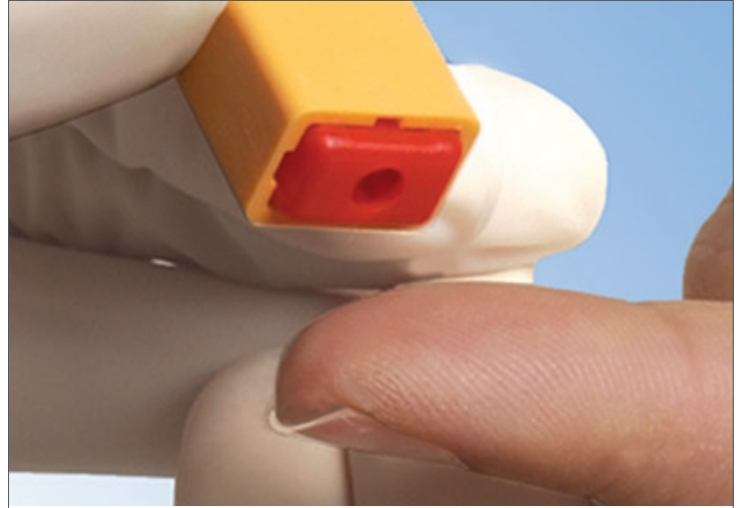

2 Ort rot Ende der Sicherheit Lancet auf dem Testgelände.



3 Drücken Sie die Sicherheit Lancet gegen Test Site zu aktivieren des Lancet Mechanismus.

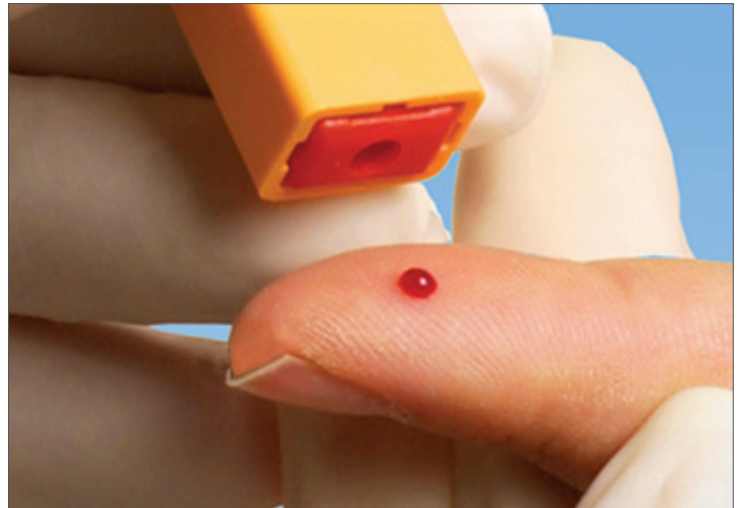

4 Einmal verwendet, werfen Lanzette in Müllbehälter.

1. Stellen Sie sicher, dass die Hände vor und nach der Verwendung des Geräts ordnungsgemäß gewaschen werden.
2. Aus Sicherheits- und Sterilitätsgründen drücken Sie die rote angehobene Plattform nicht auf den Finger des Patienten, bevor Sie bereit sind, eine Blutprobe zu entnehmen.
3. The Surgilance™ -Sicherheit Lancette ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Gesundheitseinrichtungen vorgesehen. Benutzer zu Hause, die körperlich und geistig in der Lage sind, das Gerät zur Selbsttestung zu verwenden, sollten vor der Anwendung ihren Gesundheitsdienstleister konsultieren.
4. Wenn das Gerät in Gesundheitseinrichtungen verwendet wird, stellen Sie sicher, dass Lanzetten mit geeigneter persönlicher Schutzausrüstung wie z. B. Handschuhen verwendet werden.
5. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

6. Nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit oder korrosiven Gasen lagern.
7. Trocken und gut belüftet aufbewahren.
8. Nicht verwenden, wenn das Produkt feucht oder abgelaufen ist.
9. Warnhinweise: Das Gerät ist nicht zur Wiederverwendung vorgesehen. Verwenden Sie jedes Gerät nicht für mehr als einen Patienten. Der unsachgemäße Gebrauch von Blut Lanzetten kann das Risiko einer unbeabsichtigten Übertragung von Blutkrankheitserregern erhöhen, insbesondere in Umgebungen, in denen mehrere Patienten getestet werden.
10. Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls kontaktieren Sie MediPurpose unter sales@medipurpose.com und/oder die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Vorfall aufgetreten ist.

[medipurpose.com/surgilance/ifu/](https://www.medipurpose.com/surgilance/ifu/)