





1 Pulire il sito test con alcool isopropilico e asciugare. Rimuovere il cappuccio protettivo dalla sicurezza lancet.

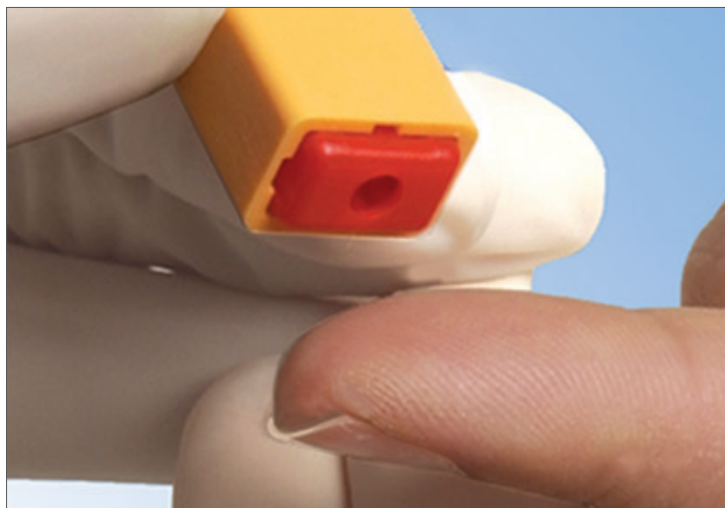

2 Mettere rosso di fine sul sito di prova.



3 Spingere verso il basso contro il sito di prova per attivare il meccanismo della lancetta.

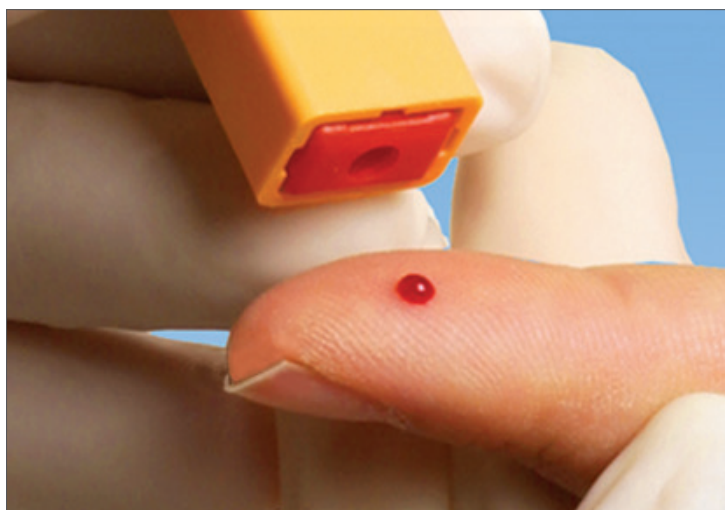

4 Una volta utilizzata, gettare la lancetta nel contenitore dei rifiuti.

1. Assicurarsi di lavare accuratamente le mani prima e dopo l'uso del dispositivo.
2. Per garantire la sicurezza e preservare la sterilità, non premere la piattaforma rossa rialzata sul dito del paziente fino al momento effettivo del prelievo del campione di sangue.
3. Il pungidito di sicurezza Surgilance™ è pensato per l'uso da parte di operatori sanitari in strutture sanitarie. Gli utenti domiciliari, che siano fisicamente e mentalmente in grado di eseguire l'autotest, devono consultare il proprio medico prima dell'utilizzo.
4. Se utilizzato in strutture sanitarie, assicurarsi che i pungidito siano usati con adeguati dispositivi di protezione individuale, ad esempio i guanti.
5. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

6. Non conservare in ambienti ad alta temperatura, alta umidità o in presenza di gas corrosivi.
7. Mantenere asciutto e ben aerato.
8. Non utilizzare se il prodotto è umido o scaduto.
9. Avvertenze: il dispositivo non è destinato al riutilizzo. Non utilizzare ogni dispositivo su più di un paziente. L'uso improprio del pungidito può aumentare il rischio di trasmissione involontaria di patogeni trasmessi dal sangue, specialmente in contesti in cui vengono testati più pazienti.
10. In caso di incidente grave, contattare MediPurpose all'indirizzo sales@medipurpose.com e/o l'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente.