






1 Limpe o local do teste com álcool isopropílico e seque ao ar. Retire a tampa protetora da lanceta de segurança

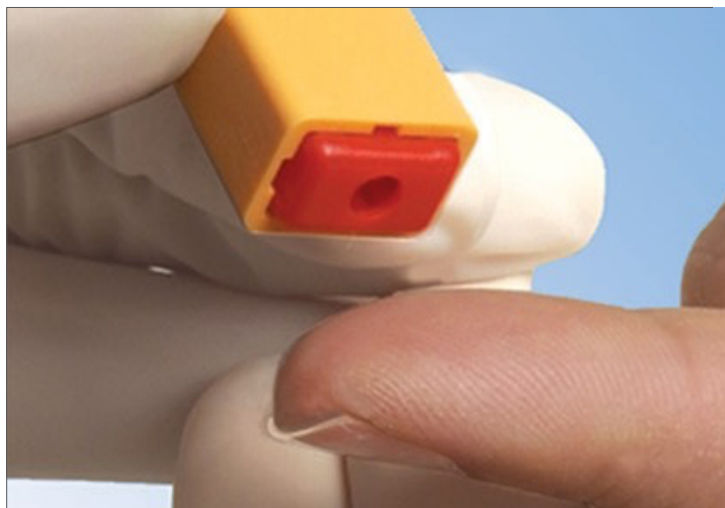

2 Posicione a extremidade vermelha da lanceta de segurança no local do teste.

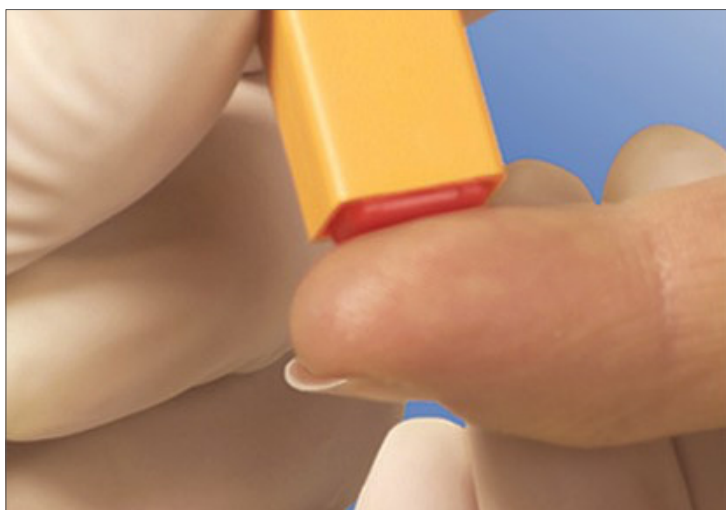

3 Empurre a lanceta de segurança para baixo contra o local de teste para activar o mecanismo da lanceta.

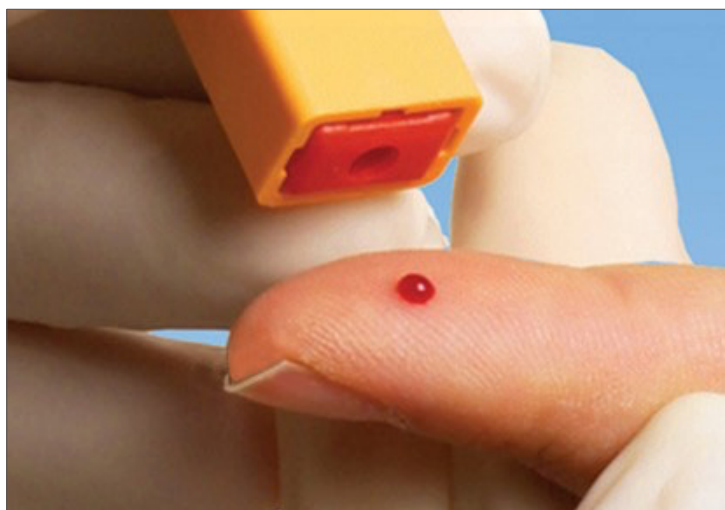

4 Uma vez utilizada, descarte a lanceta para um recipiente para objectos cortantes

1. Garanta que as mãos são devidamente lavadas antes e depois da utilização do dispositivo.
2. Por segurança e para manter a esterilidade, não empurre a plataforma elevada vermelha para o dedo do paciente até estar pronto para recolher uma amostra de sangue.
3. A lanceta de segurança Surgilance™ foi concebida para profissionais de saúde para ser utilizada em contextos de saúde. Utilizadores em casa que são física e mentalmente capazes de utilizar o dispositivo por motivos de autoteste, deve consultar o seu profissional de saúde antes de utilizar.
4. Se utilizado em ambientes de saúde, garanta que as lancetas são utilizadas com o equipamento de proteção individual adequado, por exemplo, luvas.
5. Não utilize se a embalagem estiver danificada

6. Não armazene em ambientes de alta temperatura, alta humidade ou com gases erosivos.
7. Mantenha o dispositivo seco e com boa aeração.
8. Não utilize se o produto estiver húmido ou fora de prazo.
9. Avisos: o dispositivo não se destina a reutilização. Não utilize cada dispositivo em mais do que um paciente. A utilização incorreta de lancetas pode aumentar o risco de transmissão inadvertida de agentes patogénicos transmitidos pelo sangue, especialmente em contextos onde vários pacientes são testados.
10. No caso de um incidente grave, contacte a MediPurpose em sales@medipurpose.com e/ou a autoridade competente do Estado-Membro onde o incidente ocorreu.

medipurpose.com/surgilance/ifu/

MediPurpose™