





1 Limpie el sitio de prueba con alcohol isopropílico y seque al aire. Retire la tapa protectora de la lanceta de seguridad.

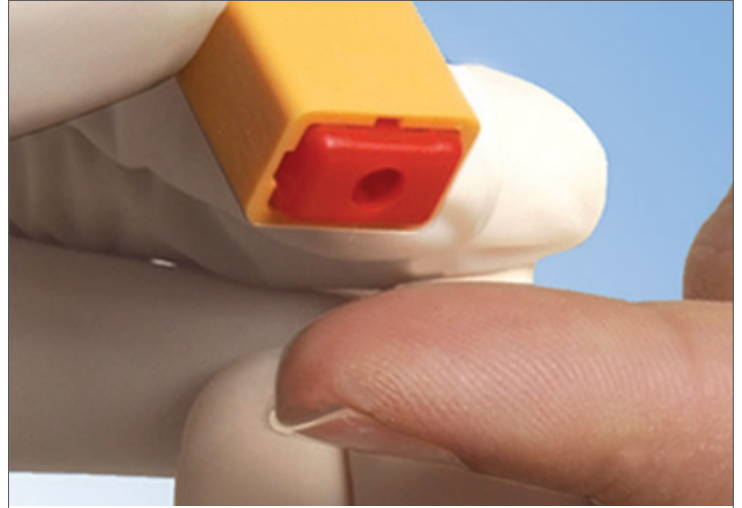

2 Coloque el rojo final de la lanceta en el sitio de la prueba.



3 Empuje la lanceta de seguridad contra el sitio de prueba para activar el mecanismo de punción.

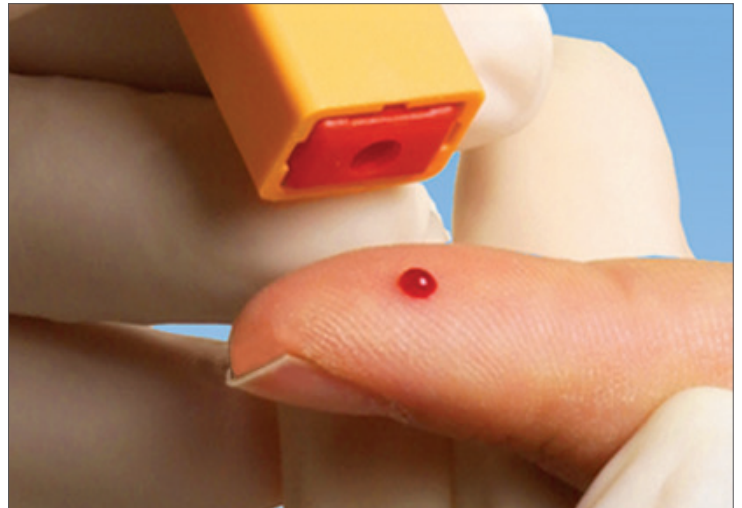

4 Una vez utilizado, simplemente deseche la lanceta en un contenedor de objetos punzantes.

1. Asegúrese de lavarse bien las manos antes y después de usar el dispositivo.
2. Por seguridad y para mantener la esterilidad, no presione la plataforma roja elevada sobre el dedo del paciente hasta que esté listo para obtener una muestra de sangre.
3. La lanceta de seguridad SurgiLance™ está diseñada para que la utilicen profesionales sanitarios en entornos de atención médica. Los usuarios que la utilicen en casa y tengan la capacidad física y mental para autoevaluarse deben preguntarle a su médico antes de usarla.
4. Si se utiliza en entornos de atención médica, asegúrese de usar las lancetas con el equipo de protección personal adecuado, como unos guantes.
5. No usar si el embalaje está roto.

6. No almacenar en ambientes con temperatura alta, humedad alta ni con gases erosivos.
7. Mantener en un lugar seco y bien ventilado.
8. No utilizar el producto si está húmedo o caducado.
9. Advertencias: el dispositivo no está diseñado para reutilizarse. No utilizar el dispositivo en más de un paciente. El uso inadecuado de las lancetas para análisis de sangre puede aumentar el riesgo de transmisión accidental de patógenos transmitidos por la sangre, especialmente en entornos donde se realizan pruebas a varios pacientes.
10. En caso de que se produzca un problema grave, póngase en contacto con MediPurpose a través del correo electrónico sales@medipurpose.com o con la autoridad competente del Estado miembro donde se produjo el problema.

medipurpose.com/surgilance/ifu/